

Pokyny pro čištění

Artroskop, plášť/obturátor a světelný kabel

Ref. č.: 8300036855
8300036856
8300042896
8300042899
8300036852
8300036853
8300036849
8300036850

Ref. č.: 11010007
11010008
11010009
84-20-5005
84-20-5004

Ref. č.: 8300036857
8300042101
8300042103
8300036862
8300036858
8300036861
8300036859
8300036860



Ruční předčištění:

Artroskop

1. Demontujte adaptéry na světelný kabel
2. Položky čistěte měkkým kartáčem pod studenou kohoutkovou vodou, dokud neodstraníte všechny viditelné nečistoty
3. Neoplachujte vodní tryskou
4. Dezinfikujte artroskop, plášť, obturátor a světelný kabel
5. Artroskop, plášť, obturátor a světelný kabel opláchněte tekoucí vodou
6. Nečistěte pomocí stlačeného vzduchu
7. Artroskop, plášť, obturátor a světelný kabel osušte měkkým hadříkem

Světelný kabel

1. Demontujte adaptéry na světelný kabel
2. Položky čistěte měkkým kartáčem pod studenou kohoutkovou vodou, dokud neodstraníte všechny viditelné nečistoty
3. Neoplachujte vodní tryskou
4. Dezinfikujte artroskop, plášť, obturátor a světelný kabel
5. Artroskop, plášť, obturátor a světelný kabel opláchněte tekoucí vodou
6. Nečistěte pomocí stlačeného vzduchu
7. Artroskop, plášť, obturátor a světelný kabel osušte měkkým hadříkem

Plášť/obturátor

1. Demontujte uzavírací kohouty pracovního kanálu
2. Položky čistěte měkkým kartáčem pod studenou kohoutkovou vodou, dokud neodstraníte všechny viditelné nečistoty
3. Pracovní kanál vyplachujte vodní tryskou po dobu nejméně 10 sekund za tlaku alespoň 3,8 bar
4. Dezinfikujte artroskop, plášť, obturátor a světelný kabel
5. Artroskop, plášť, obturátor a světelný kabel opláchněte tekoucí vodou
6. Pracovní kanál vysušte pomocí stlačeného vzduchu
7. Artroskop, plášť, obturátor a světelný kabel osušte měkkým hadříkem

*Doporučuje se používat mycí a sterilizační misky ZB

Mechanické čištění/dezinfekce:

1. Bezprostředně před mechanickým očištěním opláchněte předměty pod tekoucí vodou, abyste zabránili vniknutí zbytků z ručního čištění do zařízení
2. Předměty vložte do čistícího/dezinfekčního zařízení
3. Spusťte program čištění s následujícími parametry:
 - Nejprve oplachujte studenou vodou po dobu 1 minuty
 - Vypouštění – Nejprve oplachujte studenou vodou po dobu 3 minut
 - Vypouštění – Čistěte 0,5 % zásaditým čistícím prostředkem po dobu 5 minut při 55 °C nebo 0,5 % enzymatickým čistícím prostředkem při 45 °C*
 - Vypouštění – Neutralizujte po dobu 3 minut pod teplou kohoutkovou vodou (<40 °C) za použití neutralizátoru*
 - Vypouštění – Proveďte průběžný oplach, po dobu 2 minut oplachujte teplou kohoutkovou vodou (<40 °C)
 - Vypouštění – Sušení
 - Dezinfekce

Po čištění/kontrola:

1. Zkontrolujte položky, zda na nich neulpělo zbytkové znečištění nebo zda nejsou poškozené
2. Proveďte kontrolu funkčnosti a údržbu (namažte uzavírací kohouty)

Sterilizace**:

1. Frakční předběžné vakuum
2. Sterilizační teplota pro nasycenou páru 132–137 °C
3. Minimální doba trvání 3–5 minut
4. Sušení nejméně 10 minut

Informace jsou čerpány z SMP 17518-SMP-RE-REV01, IFU 8300037071 Rev. 2016/09, 8300037070 Rev. 2016/09, 1201549/10000020289 00/2017-03/Hahn. 2018-09-13, LIT021 Rev L, pro bližší informace se prosím vraťte zpět k IFU (informace pro použití). Doporučuje se používat mycí a sterilizační misky ZB

*Používají se následující roztoky (Zásadité: Neodisher FA) (Enzymatické: Endozime) (Neutralizér: Neodisher Z)

Veškerý obsah uvedený v tomto dokumentu je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami a případně dalšími právy duševního vlastnictví, které společnost Zimmer Biomet nebo její přidružené společnosti vlastní nebo na ně má licenci, pokud není uvedeno jinak, a nesmí být dále šířeny, duplikovány nebo zveřejňovány, zcela nebo částečně, bez výslovného písemného souhlasu společnosti Zimmer Biomet.

Tento materiál je určen pro zdravotnické pracovníky. Distribuce jiným příjemcům je zakázána.

Indikace, kontraindikace, varování, preventivní opatření, možné nežádoucí účinky a informace o poradenství pro pacienty naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na místního zástupce; pro více informací o výrobku navštivte www.zimmerbiomet.com.

Není určeno k distribuci ve Francii.

© 2020 Zimmer Biomet



Oprávněný zástupce

Qualrep Services B.V.
Utrechtseweg 310 B42
6812 AR Arnhem
Nizozemsko



Zákonný výrobce

Santa Barbara Imaging Systems 340
Storke Rd
Suite 101 Goleta
93117 USA
Tel.: 805-770-2110

Distributor

Zimmer GmbH
Sulzerallee 8
8404 Winterthur Švýcarsko
zimmerbiomet.com



Zákonný výrobce

W.O.M. WORLD OF MEDICINE GmbH
Salzufer 8
10587 Berlín, Německo



Zákonný výrobce

Henke-Sass, Wolf GmbH
Keltenstrasse 1
78532 Tuttlingen
Německo

TraumaPro

 ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.®

www.zimmerbiomet.com

www.traumapro.cz



