

Čištění a přenastavení bipolární rukojeti

Ref. č.: 11010027



Ruční předčištění:

1. Pokud je k rukojeti stále připevněna vložená elektroda, vyjměte ji a zlikvidujte
2. Předem opláchněte a pomocí pH neutrálního roztoku*, tekoucí studené vody a měkkého kartáče nebo syntetického fleecového polštářku odstraňte zbytky jako je krev, mastnota, měkké tkáně, sekrece atd.
3. Pomocí vodní trysky proplachujte sací trubici rukojeti studenou kohoutkovou vodou po dobu 60 sekund
4. Proveďte konečný oplach stoprocentně deionizovanou vodou
5. Rukojeť osušte stlačeným vzduchem nebo hadříkem, který nepouští vlákna

Mechanické čištění/dezinfekce:

1. Bezprostředně před mechanickým očištěním pod tekoucí vodou rukojeť opláchněte, abyste zabránili vniknutí zbytků z ručního čištění do zařízení
2. Násadec umístěte do čisticího/dezinfekčního zařízení
3. Spusťte program čištění s následujícími parametry:
 - Předběžné mytí
 - Vypouštění – Myjte enzymatickým čističem (Neodisher® mediclean Forte Dr. Weigert GmbH & Co. KG)* po dobu 5–10 minut při 90–93 °C
 - Vypouštění – Oplach deionizovanou vodou
 - Vypouštění – Sušení

Po čištění/kontrola:

1. Zkontrolujte, zda na rukojeti nejsou viditelné zbytky nečistot
2. Za použití sterilního stlačeného vzduchu při > 2 bar zkontrolujte dutiny rukojeti, zda v nich nezůstala voda

*V případě potřeby použijte dezinfekční prostředky, které neobsahují aldehydy a nevážou vodu



Sterilizace:

1. Frakční předběžné vakuum
2. Sterilizační teplota pro nasycenou páru 134 °C
3. Minimální doba trvání 5 minut

Veškerý obsah uvedený v tomto dokumentu je chráněn autorskými právy, ochrannými známkami a případně dalšími právy duševního vlastnictví, které společnost Zimmer Biomet nebo její přidružené společnosti vlastní nebo na ně má licenci, pokud není uvedeno jinak, a nesmí být dále šířeny, duplikovány nebo zveřejňovány, zcela nebo částečně, bez výslovného písemného souhlasu společnosti Zimmer Biomet.

Tento materiál je určen pro zdravotnické pracovníky. Distribuce jiným příjemcům je zakázána.

Indikace, kontraindikace, varování, preventivní opatření, možné nežádoucí účinky a informace o poradenství pro pacienty naleznete v příbalové informaci nebo se obraťte na místního zástupce; pro více informací o výrobku navštivte www.zimmerbiomet.com.

Není určeno k distribuci ve Francii.

© 2020 Zimmer Biomet

Informace jsou čerpány z IFU (informace pro použití) ZIM002.ML.B. 2018-09-13, pro bližší informace se prosím vraťte zpět na IFU
*Rukojeť je odolná vůči většině chemických sloučenin používaných při procesu čištění/dezinfekce v rozmezí pH 5,5 až 12,3

TraumaPro

 **ZIMMER BIOMET**
Your progress. Our promise.®

3064.1-EMEA-en-REV0420



Zákonný výrobce
Reger Medizintechnik GmbH
Gewerbestr. 10
D-78667 Villingendorf
Německo

Distributor
Zimmer GmbH
Sulzerallee 8
8404 Winterthur Švýcarsko
zimmerbiomet.com



www.zimmerbiomet.com,
www.traumapro.cz